

Adapt Désodorisant Lubrifiant

Accessoire

CONSEILS DE MISE EN PLACE

A quoi sert-il ?

- Il permet de faire glisser les selles qui stagnent en haut des poches et qui peuvent obstruer le filtre.
- Il facilite la vidange pour les utilisateurs de poches vidables.
- Il lutte contre les odeurs désagréables.




Comment l'utiliser ?

- 1 Déposez quelques gouttes du Désodorisant Lubrifiant Adapt dans la poche par l'orifice de découpe 1A ou par l'orifice de vidange (si vous avez une poche vidable) 1B.

Mettez en place votre appareillage comme à votre habitude.

- 2 Massez uniformément l'ensemble de la poche afin de bien répartir le Désodorisant Lubrifiant Adapt. Évitez le contact du Désodorisant Lubrifiant Adapt avec le support de votre poche.

Poche fermée

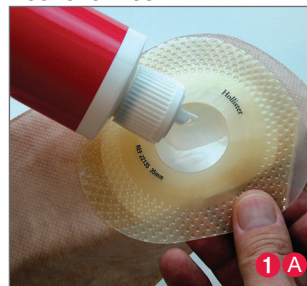

Poche vidable



Questions fréquemment posées

Est-ce un problème si le Désodorisant Lubrifiant Adapt entre en contact avec le filtre ?	Pas de crainte : le filtre de votre poche Hollister possède une membrane en Gore médical qui le rend imperméable aux liquides.
Est-ce un problème s'il entre en contact avec le support ?	Il vaut mieux éviter ; pour cela il est préférable de garder le film protecteur qui se trouve sur le support lorsque vous versez le désodorisant.
Dois-je utiliser le Désodorisant Lubrifiant Adapt à chaque fois que je vide ma poche ?	Pour une efficacité optimale, il est préférable de remettre quelques gouttes à chaque fois.

Comment va-t-il m'aider ?

- Les deux faces de la poche ne se collent plus.
- Les selles ne stagnent plus dans le haut de la poche risquant de provoquer des fuites.



Produit	Conditionnement	Référence	Code ACL13
Adapt Désodorisant Lubrifiant - Flacon	1 flacon de 236 ml	78500	34010 43017968
Adapt Désodorisant Lubrifiant - Sachets	1 boîte de 50 sachets de 8 ml	78501	34015 65673635

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec votre infirmier(e) référent(e).

Hollister met à votre disposition une ligne et une adresse email spécialement dédiées à vos remarques et suggestions concernant ce produit.

0 800 479 267 Service & appel gratuits

ou par internet à assistance.conseil@hollister.com



Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse
Boieldieu
92042 Paris La Défense
www.hollister.fr

Adapt Désodorisant Lubrifiant est un dispositif médical fabriqué par Hollister Incorporated, c'est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce matériel s'utilise selon les conseils de votre médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé compétent. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage avant utilisation. Gore est une marque déposée de W.L. Gore & Associates, Inc. Hollister et son logo, et Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated. RCS Nanterre 402 202 733. FRO118 - Juillet 2014 Version internet 2017